


# SORBACT® FOAM

Infektiota ehkäisevä vaahtosidos

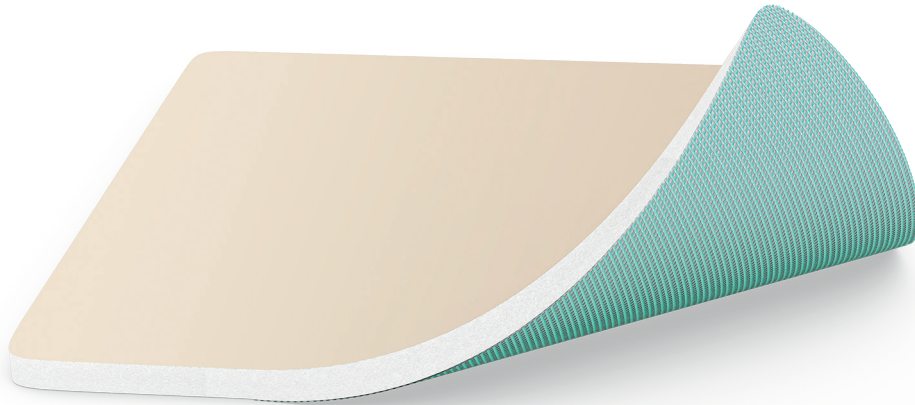

## HAAVAN BAKTEERIKUORMAN HALLINTAAN. KOHTALAISESTI ERITTÄVILLE HAAVOILLE

Sorbact® Foam on steriili, bakteereja ja sienimikrobeja sitova vaahtosidos. Sidoksessa on vihreä Sorbact® pinta, polyuretaanikerros sekä puoliläpäisevä pintakalvo. Sorbact® Foam sidos imee ja sitoo haavaeritteen sidokseen, ehkäisee maseraatiota ja ylläpitää haavan luonnollista kosteustasapainoa.

Tuote	Tuotenro.	Koko	Kpl/tukku
Sorbact® Foam	98310	10x10 cm	10
Sorbact® Foam	98315	15x15 cm	10
Sorbact® Foam	98320	10x20 cm	10



## KÄYTTÖTARKOITUS

Sorbact® Foam soveltuu puhtaiden, kolonisoituneiden, kontaminoituneiden ja infektoituneiden, vähän tai kohtalaisesti erittävien haavojen hoitoon. Esimerkiksi kirurgiset haavat, traumahaavat, painehaavat, diabeettiset haavat ja jalka- sekä säärihaavat.

## KÄYTTÖOHJE

1. Puhdista haava.
2. Valitse oikean kokoinen sidos. Sidoksen tulee olla vähintään 2 cm haava-alueetta suurempi.
3. Poista sidos pakkauksestaan aseptisesti.
4. Sidosta voi leikata. Sidos tulee leikata aseptiikkaa noudattaen.
5. Aseta sidos haavalle. Varmista, että sidos on tiiviissä kosketuksessa koko haavapintaan.
6. Valitse sopiva kiinnitys.
7. Vaihdeväli haavan tilan ja ympäröivän ihon kunnon sekä erityksen mukaan. Maksimissaan sidos voi olla paikoiltaan 7 vrk.



### SORBACT® – INFEKTIOTA EHKÄISEVÄ SIDOS

Sorbact® sidos vähentää haavan bakteerikuormaa hyödyntäen mikrobien luonnollista hydrofobista sitoutumiskykyä. [www.sorbact.fi](http://www.sorbact.fi)