

SORBACT® SYKERÖ

Infektiota ehkäisevä haavasykerö



HAAVAN BAKTEERIKUORMAN HALLINTAAN. PIENET, SYVÄT HAAVAT.

Sorbact® Sykerö on steriili, bakteereja ja sienimikrobeja sitova sidos. Sykerön muotoisessa sidoksessa on vihreä Sorbact® -pinta. Sykerö on sidottu muotoonsa sidoksen sisällä olevalla silikonilenkillä.

| Tuote | Tuotenro. | Koko | Kpl/tukku |
|-----------------|-----------|--------|-----------|
| Sorbact® Sykerö | 98126 | Ø 3 cm | 70 (5x14) |



KÄYTTÖTARKOITUS

Sorbact® Sykerö soveltuu puhtaiden, kolonisoituneiden, kontaminoituneiden ja infektoituneiden, erittävien haavojen puhdistukseen tai pienten, syvien haavojen hoitoon.

KÄYTTÖOHJE - HAAVAN PUHDISTAMINEN

1. Poista sidos pakkauksestaan aseptisesti.
2. Kostuta sykerö esim. keittosuolaliuoksella tai aqualla.
3. Puhdista haavapohja varoen.

KÄYTTÖOHJE - HAAVANHOITO

1. Puhdista haava.
2. Poista sykerö pakkauksestaan aseptisesti.
3. Aseta sykerö haavalle. Varmista, että sykerö on tiiviissä kosketuksessa koko haavapintaan.
4. Valitse sopiva peittosidos.
5. Vaihtoväli haavan tilan ja ympäröivän ihon kunnon sekä erityksen mukaan. Maksimissaan sidos voi olla paikoillaan 7 vrk.



SORBACT® – INFEKTIOTA EHKÄISEVÄ SIDOS

Sorbact® sidos vähentää haavan bakteerikuormaa hyödyntäen mikrobien luonnollista hydrofobista sitoutumiskykyä. www.sorbact.fi