


SORBACT® TAITOS

Infektiota ehkäisevä haavataitos

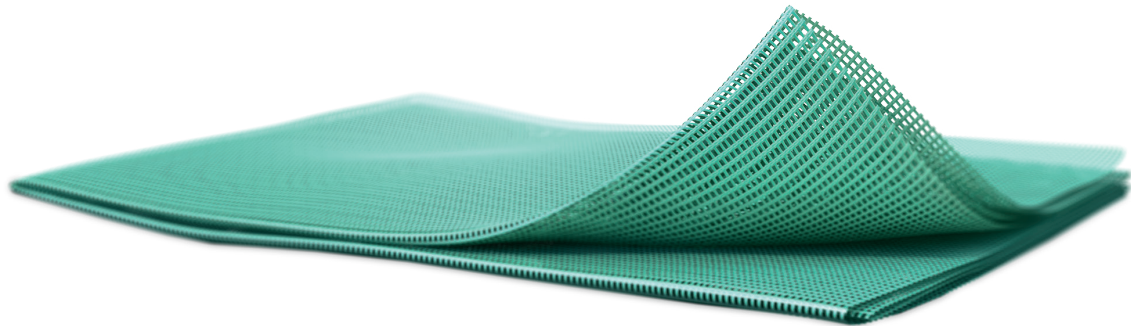

HAAVAN BAKTEERIKUORMAN HALLINTAAN

Sorbact® Taitos on steriili, bakteereja ja sienimikrobeja sitova sidos. Vihreä Sorbact® Taitos sitoo bakteerit ja sienimikrobit pintaansa ja läpäisee nopeasti haavaeritteen toiseen imevään sidokseen. Taitos koostuu kaikkiaan 8 eri kerroksesta. Soveltuu käytettäväksi kompressiohoidon yhteydessä.

Tuote	Tuotenro.	Koko	Kpl/tukku
Sorbact® Taitos	98128	4x6 cm	40
Sorbact® Taitos	98125	7x9 cm	40



KÄYTTÖTARKOITUS

Sorbact® Taitos on steriili, bakteereja ja sienimikrobeja sitova sidos. Vihreä Sorbact® Taitos sitoo bakteerit ja sienimikrobit pintaansa ja läpäisee nopeasti haavaeritteen toiseen imevään sidokseen. Taitos koostuu kaikkiaan 8 eri kerroksesta. Soveltuu käytettäväksi kompressiohoidon yhteydessä.

KÄYTTÖOHJE

1. Puhdista haava.
2. Valitse oikean kokoinen sidos. Taitoksen voi taitella möyheästi kerroksittain ja se voi mennä haavareunojen yli.
3. Poista sidos pakkauksestaan aseptisesti.
4. Aseta sidos haavalle. Varmista, että sidoksen vihreä pinta on tiiviissä kosketuksessa koko haavapintaan.
5. Aseta taitos haavalle. Varmista, että taitos on tiiviissä kosketuksessa koko haavapintaan. Syviä haavoja hoidettaessa laita haavalle tarvittaessa useampi taitos. Fistulamaisia haavoja hoidettaessa varo täyttämästä fistulaa liian tiukka.
6. Valitse sopiva imevä sidos erityksen määrän huomioiden.
7. Vaihtoväli haavan tilan ja ympäröivän ihon kunnon sekä erityksen mukaan. Maksimissaan taitos voi olla paikoillaan 7 vrk.



SORBACT® – INFEKTIOTA EHKÄISEVÄ SIDOS

Sorbact® sidos vähentää haavan bakteerikuormaa hyödyntäen mikrobien luonnollista hydrofobista sitoutumiskykyä. www.sorbact.fi