

NRO 4 SORBACT® TAPAUSSELOSTE

Tapausselosteen tekijä: Auktorisoitu haavahoitaja Ulla-Riitta Vappula, Lahden kaupunki, Mediverkko

HAAVATYYPPI
TRAUMAHAAVA KYYNÄRPÄÄSSÄ

TUOTE
Sorbact® Nauha / Sorbact® Foam

HOITAJAKSO
23.10.2012-14.1.2013

HAAVAN JA POTILAAN TAUSTA

Noin 70- vuotias nainen, joka on kaatunut kotona ja satuttanut vasemman kyynärpäähän. Kaatumisen seurauksena rouva saanut traumahaavan vasempaan kyynärpäähänsä. Rouva hoitanut haavaa itse kotona noin viikon.

Rouvan tullessa haavahoitajan vastaanotolle haava on syvä ulottuen lähes kyynärluuhun asti, onkalomainen, erittäin keltaisen katteen täyttämä ja se erittää runsaasti. Haava ei kuitenkaan ole kipeä.

HOITOMENETELMÄN KUVAUS

Paksua fibriinikatetta kauhottiin haavalta ja puhdistetaan NaCl liuoksella. Lisäksi haavalle tehtiin vetyperoksidi kuohautus. Haavaonkalo täytettiin löyhästi 1 cm Sorbact® Nauhalla ja peittosidokseksi laitettiin Sorbact® Haavatyyyny, joka kiinnitettiin kierresidoksella.

Aluksi haava hoidettiin päivittäin jotta kate saatiin tehokkaasti puhdistettua. Potilaalla aloitettiin lisäksi antibiootti kuuri. Haavaonkalon paranemisen edistyessä hoitoa kevennettiin.

Kun haavan erityis väheni hoito tehtiin 2-3 päivän välein.

HOIDON AIKAVÄLI

23.10.2012 – 14.1.2013. Haavan hoito kesti n 2½ kuukautta.

