

NRO 5 SORBACT® TAPAUSSELOSTE

Tapausselosteen tekijä: Auktorisoitu haavahoitaja Anne Ojala, JYTE Jyväskylän terveyskeskussairaala

HAAVATYYPPI RUUSUINFEKTIO

TUOTE

Sorbact® Taitos
Sorbact® Foam

HOIDON AIKAVÄLI 13.5.2015 – 25.5.2015

HAAVAN JA POTILAAN TAUSTA

Potilas on hakeutunut hoitoon korkean kuumeen ja vasemman jalan ihon rakkuloinnin vuoksi. Jalassa todetaan ruusuinfektio. Potilaalla riskijalka (luokka 3). Toinen jalka on amputoitu aiemmin. Taustalla mm. DM 2, ASO-tauti, verenpainetauti ja kihti.

HOITOMENETELMÄN KUVAUS

Tilanne 13.5.2015. Hoidon alussa rakkuloiden suojana oli imevät haavatyyny. Potilaan siirtyessä osastohoitoon hoitoa tehostetaan. Avoimille haava-alueille laitetaan ohut kerros hunajavoidetta. Päälle Sorbact® Taitos ja imevä sidos.

Tilanne 18.5.2015. Alussa hoito tehdään päivittäin. Haava-alueelta poistetaan mekaanisesti kuollutta kudosta. Muutama päivä hoidon aloituksesta hunajavoide jätetään pois ja haava-alue peitetään ilmavasti Sorbact® Taitoksella. Peittosidokseksi laitetaan imevät haavatyynyt, jotka kiinnitetään putkisukan avulla. Haava-alue on selkeästi rauhoittunut. Potilaalla i.v antibiootti.

Tilanne 21.5.2015. Haavan paraneminen on edistynyt. Infektio on rauhoittunut, jalan punotus ja turvotus vähentynyt. Haavaeritys on vähäistä ja hoidoksi on vaihdettu Sorbact® Foam, joka kiinnitetään putkisukalla. Parantunut ihoalue rasvataan perusvoiteella.

Tilanne 25.5.2015. Haava on parantunut täysin. Jalkaan tehdään enää perusrasvaus. Potilas tyytyväinen saamaansa hoitoon.

Hoidon aikaväli: 13.5.2015 – 25.5.2015.

