


# SORBACT® FOAM GENTLE BORDER

Haavainfektiota ehkäisevä pehmeä, silikonikiinnitteinen sidos

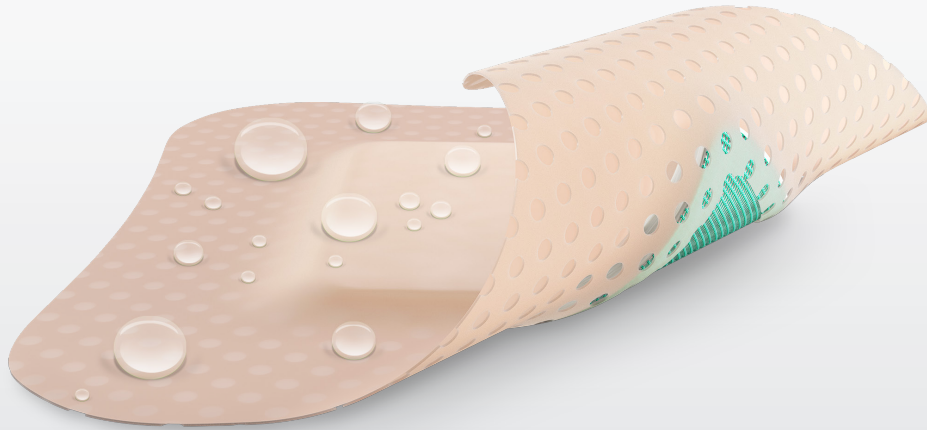

## HAAVAINFEKTIOTA EHKÄISEVÄ, ALL-IN-ONE, SIDOS


Sorbact® Foam Gentle Border on steriili, bakteereita ja sienimikrobeja sitova, itsekiinnittyvä, imevä haavasidos. Sidoksessa on vihreä Sorbact® -pinta, polyuretaanivaaho, pehmeät silikonipintaiset reunat ja hengittävä polyuretaanikalvo. Sorbact® Foam Gentle Border sopii käytettäväksi monen tyyppisille erilaisille haavoille.

Tuote	Tuotenro.	Koko	Kpl/tukku
Sorbact® Foam Gentle Border	98531	7,5x7,5 cm	10
Sorbact® Foam Gentle Border	98532	10x10 cm	10
Sorbact® Foam Gentle Border	98533	15x15 cm	10



## KÄYTTÖTARKOITUS


Sorbact® Foam Gentle Border soveltuu käytettäväksi puhtaan, kolonisoituneen, kontaminoituneen tai infektoituneen, kohtalaisesti erittävän haavan hoitoon. Esim. kirurgiset haavat, traumahaavat, painehaavat, diabeettiset haavat sekä jalka- ja säärihaavat.

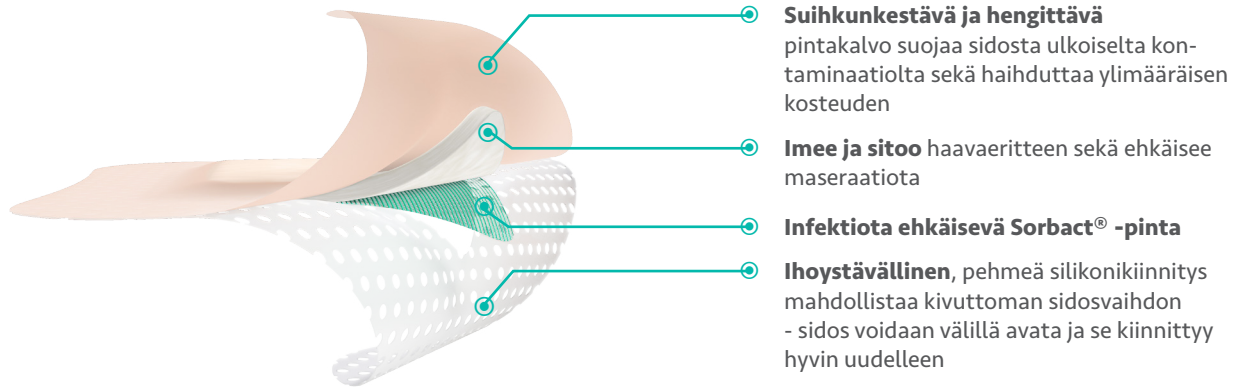

## KÄYTTÖOHJE

1. Puhdista haava. Varmista, että ympäröivä iho on puhdas ja kuiva.
2. Valitse oikean kokoinen sidos. Sidoksen imutyynyn tulee olla noin 1 cm haavaa isompi maseraation välttämiseksi.
3. Poista sidos pakkauksestaan.
4. Poista sidoksen suojakalvot.
5. Aseta sidos paikoilleen. Älä venytä sidosta. Varmista, että sidoksen vihreä pinta on tiiviisti haavapohjaa vasten.
6. Painele sidoksen reunat ihoon kiinni. Tarvittaessa sidoksen voi avata ja asettaa uudelleen paikoilleen.
7. Sidoksen vaihtoväli haavaerityksen määrän ja haavan tilan mukaisesti.

Soveltuu käytettäväksi kompressiohoidon yhteydessä.

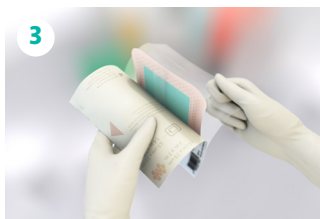

### SORBACT® – INFEKTION EHKÄISYYN

Sorbact® -sidos hyödyntää mikro-organismien luonnollista, tehokasta sitoutumista toiseen hydrofobiseen pintaan. Hydrofobinen haavanhoitomenetelmä ylläpitää ja tarvittaessa palauttaa haavan normaalin bakteeritasapainon. [www.sorbact.fi](http://www.sorbact.fi)