


SORBACT® SUPERABSORBENT

Haavainfektiota ehkäisevä superimevä haavasidos

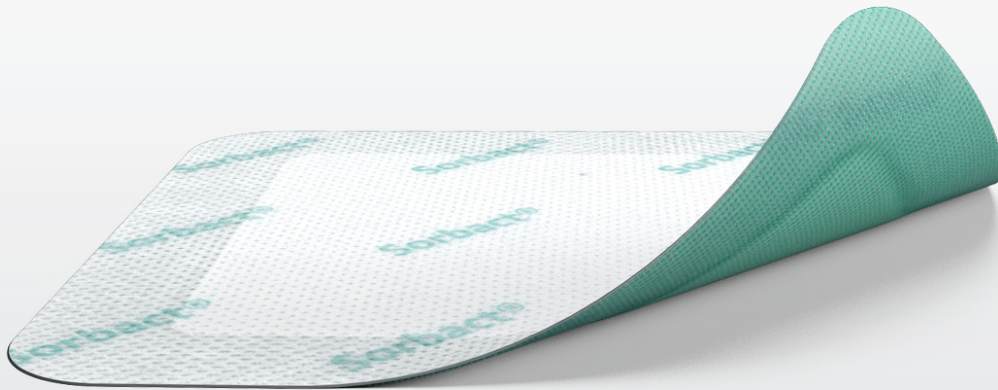

HAAVAINFEKTIOTA EHKÄISEVÄ SIDOS VOIMAKKAASTI ERITTÄVILLE HAAVOILLE


Sorbact® Superabsorbent on steriili, bakteereita ja sienimikrobeja sitova, superimevä sidos. Sidoksessa on vihreä Sorbact® -pinta, runsaasti imevä imukerros sekä valkoinen, vettähylyvä ulkopinta.

Tuote	Tuotenro.	Koko	Kpl/tukku
Sorbact® Superabsorbent	98501	10x10 cm	10
Sorbact® Superabsorbent	98502	10x20 cm	10
Sorbact® Superabsorbent	98503	20x20 cm	10
Sorbact® Superabsorbent	98504	20x30 cm	10





KÄYTTÖTARKOITUS

Sorbact® Superabsorbent soveltuu käytettäväksi puhtaiden, kolonisoituneiden, kontaminoituneiden tai infektoituneiden, runsaasti tai voimakkaasti erittävien haavojen hoitoon. Esim. kirurgiset haavat, traumahaavat, painehaavat, diabeettiset haavat tai jalka- ja säärihaavat.

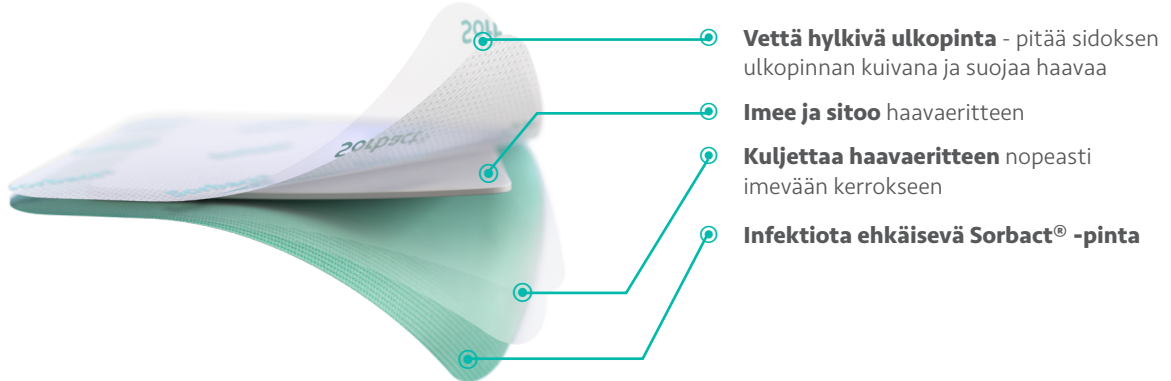

KÄYTTÖOHJE

1. Puhdista haava normaalin käytännön mukaisesti.
2. Valitse oikean kokoinen sidos. Sidoksen tulee olla vähintään 2 cm haava-alueetta suurempi.
3. Poista sidos pakkauksesta.
4. Aseta sidos paikoilleen. Varmista, että sidoksen vihreä pinta on tiiviisti vasten haavapintaa.
5. Kiinnitä sidos reunoistaan esim. ihoteipillä. Varmista, että sidos voi laajentua.
6. Sidoksen vaihtoväli määrittyy haavan erityksen ja haavan tilan mukaan. Mikäli haavaeritettä valuu haavan reunoille tulee sidos vaihtaa välittömästi. Sopii käytettäväksi kompressiohoidon yhteydessä.

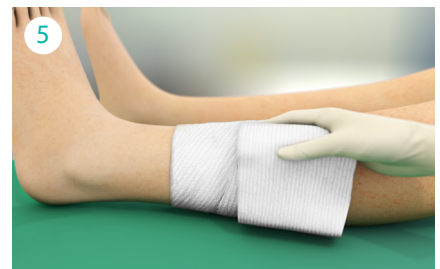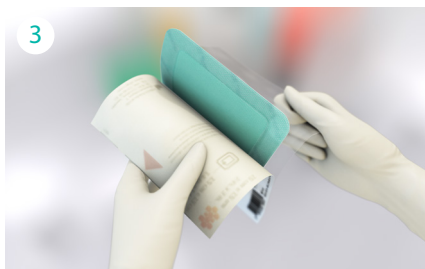

SORBACT® – INFEKTION EHKÄISYYN

Sorbact® -sidoksella hyödynnetään mikro-organismien luonnollista, tehokasta sitoutumista toiseen hydrofobiseen pintaan. Hydrofobinen haavanhoitomenetelmä ylläpitää ja tarvittaessa palauttaa haavan normaalin bakteeritasapainon.
www.sorbact.fi